

# Test Ciążowy Bobo - Test Duo (Strumieniowy+Płytkowy), 1 sztuka

Nasza cena: 23,25 zł



## Opis słownikowy

Producent	DIAGNOSIS POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

**Test Ciążowy Bobo - Test Duo** charakteryzuje się dużą wiarygodnością wyniku nawet do 99% a także krótkim czasem oczekiwania na wynik. Opakowaniu znajdują się dwa testy o różnej czułości: strumieniowy oraz płytkowy. Produkt jest prosty w użyciu.

Oba testy działają na tej samej zasadzie - wykrywają w moczu hormon HCG, którego obecność świadczy o ciąży. Test strumieniowy o czułości 10 mIU/ml to wyrób diagnostyczny o wysokiej czułości, dzięki któremu możliwe jest wykrycie już 2-dniowej ciąży. Natomiast test płytkowy o czułości 25 mIU/ml wykrywa 6-dniową ciążę.

#### Przed przeprowadzeniem testu:

1. Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia.
2. Nie otwieraj foliowej torebki testu jeżeli nie jesteś gotowa do przeprowadzenia testu.
3. Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
4. Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej
5. Przechowuj test z dala od dzieci.
6. Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

#### Sposób użycia:

- Zanim przeprowadzisz test zberz próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku.
- Wyjmij foliową torebkę z opakowania testu.
- Rozewnij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę.
- Zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu.
- Ściskając szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu.
- Trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem umieść w nim 3-4 krople moczu. Uważaj, aby nie wytworzyły się pęcherzyki powietrza.
- Po 3-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**