

Test Ciążowy Pink Super Czuły x 1



Nasza cena: 14,91 zł

Opis słownikowy

Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL. POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Pink Test jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Wykonanie badania testem ciążowym Pink Test jest bardzo proste, a wynik na płytce testowej uzyskuje się w czasie 3 minut.

Test ciążowy Pink Test należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Nie zamrażać. Nie używać testu po terminie ważności. Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone. Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Jak wykonać badanie testem ciążowym?

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny. Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia. Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie. Z kopertki wyjąć płytkę testową i plastikową pipetkę. W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić. Płytkę testową umieścić na poziomej powierzchni.

Sposób użycia

- Końcówkę plastikowej pipetki zanurzyć w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnić ją moczem.
- Odmierzyć powoli 3 pełne krople moczu do owalnego okienka S na płytce testowej.
- Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę należy trzymać pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.
- Wynik testu odczytać po 3 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka S na płytce testowej
- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.

- Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.