

# Test Owulacyjny LH Vitam, 5 testów paskowych w zestawie



Nasza cena: 9,42 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	DIAGNOSIS POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

Test owulacyjny **LH Vitam** jest szybkim i prostym w zastosowaniu testem owulacyjnym do domowego użycia. Pozwala on określić dni płodne kobiety z dokładnością 98%. Zestaw pięciu testów umożliwi dokonanie kilku prób testowych, w celu wskazania najbardziej prawdopodobnego dnia do poczęcia dziecka.

- Wyniki testu pojawią się w ciągu 5 minut.
- Wyrób do samodzielnego zastosowania.
- Test do diagnostyki in vitro (wyłącznie do użytku zewnętrznego).

### Przed przeprowadzeniem testu:

- Uważnie przeczytaj całą instrukcję użycia. Jeżeli masz jakieś pytania, co do sposobu przeprowadzenia testu lub co do jego rezultatów, zadzwoń na Bezpłatną infolinię 0 800 70 30 11 w godz. 8.00-16.00 (pn-pt)
- Foliową torebkę zawierającą test otwórz tuż przed przeprowadzeniem badania.
- Wykonaj test pomiędzy godz. 10-20
- Nie używaj testu po przekroczeniu daty ważności wydrukowanej na opakowaniu i etykiecie.
- Test przechowuj w szczelnym opakowaniu w temperaturze: 4-30° C. Nie zamrażaj.
- Przechowuj test z dala od dzieci. Chronić przed światłem słonecznym.
- Nie używać więcej niż jeden raz.
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

### Zawartość opakowania:

Zestaw Test owulacyjny LH Vitam zawiera:

- 5 testów owulacyjnych,
- instrukcję użycia,
- pochłaniacz wilgoci (UWAGA: wewnątrz torebki foliowej znajduje się saszetka pochłaniająca wilgoć, którą należy wyrzucić)

### Niezbędne elementy dodatkowe:

czysty, suchy, plastikowy lub szklany pojemnik na moc, zegarek

### Kiedy rozpocząć badanie ?

Na początku określ długość Twojego cyklu miesięczkowego - licząc od pierwszego dnia krwawienia, aż do dnia poprzedzającego kolejną miesiączkę. Ustal średnią długość cyklu na podstawie obserwacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Następnie

przyjmując pierwszy dzień krwawienia jako dzień 1 (zaznacz go w kalendarzu), użyj Tabeli 1 aby określić kiedy powinnaś rozpocząć przeprowadzanie testu.

Przykład:

Jeśli Twój cykl wynosi przeciętnie 26 dni, zacznij badanie 10-tego dnia licząc od dnia rozpoczęcia krwawienia miesięczkowego.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**