

# Test owulacyjny strumieniowy LH, 5 sztuk



Nasza cena: 22,41 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*5
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### OPIS

Test Owulacyjny Strumieniowy LH to szybki test strumieniowym służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 30 mIU/ml. Wykorzystuje on zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety.

### Sposób użycia

Przed wykonaniem badania należy przygotować papierowy ręcznik i zegarek, który będzie potrzebny do odmierzenia czasu odczytu wyniku testu.

Końcówkę testu skierować pod strumień moczu, a wynik w postaci barwnych prążków w okienku wynikowym ukaże się w czasie 5 minut.

### Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Nie należy wykonywać badania z pierwszego moczu porannego.

Dla uzyskania lepszych wyników, każde badanie powinno być wykonane mniej więcej o tej samej porze dnia.

Zaleca się notować na bieżąco daty, godziny i wyniki badań.

Na około 2 godziny przed każdym badaniem należy ograniczyć spożycie płynów.

Jeśli test był przechowywany w temperaturze 2-8°C, to na pół godziny przed wykonaniem badania należy wyjąć go z chłodziarki i

doprowadzić jego temperaturę do temperatury pokojowej.

Badanie można wykonać również z moczu pobranego do suchego i czystego pojemnika.

## Zawartość opakowania

5 foliowych szczelnie zamkniętych kopertek, w każdej znajdują się: 1 test strumieniowy i 1 środek pochłaniający wilgoć,

1 instrukcję używania wyrobu.

## Sposób przechowywania

15°C - 25°C

## Producent / Podmiot odpowiedzialny

HYDREX

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**