

# THC STRIP test na obecność marihuany i jej metabolitów (THC) w moczu 1 test



Nasza cena: 13,44 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL. POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

THC Strip to przeznaczony do domowego użytku paskowy test narkotykowy służący do wykrywania obecności marihuany lub haszyszu w moczu.

Test charakteryzuje się czułością 50 ng/ml i w szybki sposób wykrywa kanabinoidy i metabolity zawarte w moczu osób zażywających marihuanę lub haszysz. Badanie jest wiarygodne w ponad 99% przypadków.

Ważne, by pamiętać o tym, że THC utrzymuje się w organizmie człowieka przez 5-20 dni od przyjęcia narkotyku.

THC Strip test składa się z testu paskowego, który trzeba zanurzyć w próbce moczu, zebranej do suchego i czystego naczynia. Zanurzenie paska testowego powinno trwać maksymalnie 10-15 sekund. Na wynik musimy poczekać ok. 5 minut. Czas w tym badaniu należy ściśle kontrolować, dlatego niezbędny jest w tej sytuacji zegarek z sekundnikiem. Wyniki zinterpretowane po 15 minutach nie są już wiarygodne.

W teście z wynikiem dodatnim pojawia się tylko jeden różowy prążek w strefie kontrolnej C.

W celu poprawnego przeprowadzenia badania konieczne należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.

Test THC to skuteczna metoda na kontrolę narkotykową nie tylko dorosłych, ale także naszych dzieci. Statystyki wskazują, że coraz młodsze osoby sięgają po narkotyki. Jedynie wzmożona kontrola rodzicielska może skutecznie przeciwdziałać uzależnieniom od substancji psychoaktywnych.

W przypadku marihuany i jej pochodnych nie można zapomnieć również o jej medycznym zastosowaniu, które od 2017 roku zostało w Polsce zalegalizowane. W ten sposób osoby chore na poszczególne schorzenia uzyskały dostęp do preparatów wytwarzanych z konopi

indyjskich, które wydawane są na receptę.

Packshot przedstawia opakowanie z 2018 roku, natomiast w sprzedaży mogą się pojawiać również stare opakowania.

## Jak wykonać badanie?

THC Strip to prosty w wykonaniu test, który dzięki poręcznym rozmiarom i łatwej obsłudze można wykonać z łatwością bez wychodzenia z domu. Wystarczy próbka pobranego do czystego i suchego pojemnika moczu. Można go oddać o dowolnej porze dnia. Jeśli natychmiastowe przeprowadzenie badania nie jest możliwe, próbkę można przechować przez 48 godzin w temperaturze 2-8 °C. W takiej sytuacji przed dokonaniem diagnozy należy doprowadzić go do temperatury pokojowej.

- bezpośrednio przed wykonaniem badania otwórz foliową kopertę
- test wyjmij, chwytając za jego górną, nadrukowaną część. Pamiętaj, że nie możesz dotknąć innych jego części.
- obecny w kopercie środek do pochłaniania wilgoci wyrzuc do śmieci

## Wynik ujemny

W badanym moczu nie stwierdzono obecności narkotyków, gdy w polu testowym pojawiają się dwa barwne prążki – w strefie testowej T oraz w strefie kontrolnej C.

## Wynik dodatni

Jeden barwny prążek w strefie kontrolnej C oznacza pozytywny wynik potwierdzający obecność narkotyków w moczu badanego.

## Wynik nieważny

Brak reakcji lub samodzielne wystąpienie paska testowego T sygnalizuje nieważny wynik badania. Cały proces należy powtórzyć z wykorzystaniem nowego zestawu diagnostycznego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**