

# THERMACARE kompresy rozgrzewające na plecy i biodra, 2 sztuki

Nasza cena: 30,89 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*2
Producent	Angelini Pharma Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## THERMACARE kompresy rozgrzewające na plecy i biodra, 2 sztuki

Thermacare® to nowy pas rozgrzewający uwalniający głęboko wnikające lecznicze ciepło w głąb mięśni, o stałej temperaturze 40°C, przez 8 godzin noszenia kompresu.

Działanie stałego ciepła 40°C zostało sprawdzone i wielokrotnie potwierdzone jako skuteczne w leczeniu bólu. Dzięki niemu następuje prawdziwa redukcja bólu mięśniowego oraz większa elastyczność mięśni.

Terapeutyczne stałe ciepło 40°C pasa Thermacare® można odczuwać nawet do 16 godzin. Wydzielane ciepło rozluźnia w sposób naturalny bolące mięśnie, bez udziału aktywnych składników medycznych.

Skuteczne lecznicze ciepło nowego samo rozgrzewającego pasu ThermoCare® zaczyna uwalniać się już po ok. 30 minutach noszenia kompresu, przynosząc terapeutyczną ulgę w bólu.

## Przeznaczenie

Używany w celu osiągnięcia silnego, miejscowego działania uśmierzającego ból mięśni i stawów związanego z:

- napięciem mięśniowym
- wysiłkiem, przeciążeniem lub zwichnięciem
- zapaleniem stawów.

Pas ThermaCare® jest odpowiednie dla osób cierpiących z powodu przewlekłego i okresowego bólu.

## Jak działa pas ThermaCare

ThermaCare® uwalnia stałe ciepło 40°C dzięki opatentowanym dyskom rozgrzewającym. Przynosi ulgę bezpośrednio w miejscu bólu poprawiając krążenie krwi, co prowadzi do rozluźnienia napiętych mięśni. Pas ThermaCare® jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

## Dlaczego terapeutyczne stałe ciepło 40°C jest tak skuteczne?

Redukuje odczuwanie bólu:

Ciepło stymuluje termoreceptory, co powoduje blokowanie przekazywania bodźców bólowych do mózgu

Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu krwi w bolącym miejscu, co oznacza:

- lepsze dotlenienie i odżywienie uszkodzonych tkanek
- pozbycie się toksyn wytworzonych przez obolałe mięśnie

Pomaga rozluźnić napięte tkanki miękkie, rozluźniając mięśnie, co wpływa na zwiększenie elastyczności i redukuje sztywność / napięcia.

Optymalnie dobrana temperatura stałego ciepła 40°C pozwala leczyć nawet w trakcie snu, dzięki czemu pacjent z bólem ma szansę na kontynuowanie kilkudniowej sesji terapeutycznej. (Ponieważ ryzyko oparzeń skóry rośnie wraz z wiekiem jeżeli pacjent ma 55 lat bądź więcej, zaleca się stosowanie kompresu na ubranie oraz niestosowanie kompresu podczas snu.)

## Sposób użycia

Rozerwać torebkę bezpośrednio przed użyciem. Pas ThermaCare® osiąga temperaturę leczniczego stałego ciepła 40°C ciepła w ciągu 30 minut. Należy umieścić kompres w miejscu bólu ciemniejszymi dyskami do skóry.

Sposób użycia pasa na plecy: nosić do 8 godzin. Nie należy stosować dłużej niż 8 godzin podczas 24 godzinnego okresu.

## Ostrzeżenia

Produkt ten może wywołać oparzenia.

Podczas stosowania należy często kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia skóry należy natychmiast zdjąć kompres (pas)

W przypadku odczuwania zbyt wysokiej temperatury – należy przerwać stosowanie lub nałożyć kompres (pas) na warstwę ubrania, a nie bezpośrednio na skórę.

Dla oceny indywidualnej tolerancji termicznej, zanim podejmie się decyzję o zastosowaniu podczas snu, należy zastosować kompres (pas) w ciągu dnia.

Nie przykładać dodatkowego ucisku czy opaski dociskającej kompres (pas).

Produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia. Ryzyko wystąpienia poparzeń wzrasta wraz z wiekiem. Jeżeli pacjent ma 55 lat bądź więcej, zaleca się stosowanie kompresu na ubranie oraz niestosowanie kompresu podczas snu.

## Przeciwwskazania

Nie stosować:

- jeżeli zawartość komórek rozgrzewających przecieka i/lub kompres jest uszkodzony lub rozerwany
- z kremami przeciwbólowymi i/lub innymi maściami, ani z innymi środkami emitującymi ciepło
- na obszarach wylewów podskórnych czy obrzęków

- na obszarach ciała z upośledzonym czuciem ciepła
- u osób nie będących w stanie w pełni dostosować się do instrukcji albo samodzielnie zdjąć kompres, w tym u dzieci, niemowląt i u niektórych osób w podeszłym wieku.

Przed zastosowaniem tego produktu należy się skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania:

- cukrzycy
- problemów krążeniowych
- choroby serca
- reumatoidalnego zapalenia stawów
- ciąży

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**