

THERMACARE kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona, nadgarstki, 2 sztuki

Nasza cena: 27,32 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*2
Producent	Angelini Pharma Polska [PI]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

THERMACARE kompresy rozgrzewające na szyję, ramiona, nadgarstki, 2 sztuki

Nowy leczniczy suchy kompres rozgrzewający na bóle mięśniowo-stawowe: na ból karku, ramion lub nadgarstków.

ThermaCare® to nowy kompres samorozgrzewający uwalniający głęboko wnikające lecznicze ciepło w głąb mięśni, o stałej temperaturze 40°C. Działanie leczniczego ciepła na kark, ramiona lub nadgarstek to aż 12 godzin.

Wydzielane ciepło rozluźnia w sposób naturalny bolące mięśnie, bez udziału aktywnych składników medycznych.

Efektywne terapeutyczne ciepło nowego kompresu ThermaCare® zaczyna uwalniać się już po ok. 30 min noszenia kompresu, przynosząc terapeutyczną ulgę w bólu.

Używane w celu osiągnięcia silnego, miejscowego działania uśmierzającego ból mięśni i stawów związanego z:

- napięciem mięśniowym
- wysiłkiem, przeciążeniem lub zwichnięciem
- zapaleniem stawów.

Kompres ThermaCare® jest odpowiedni dla osób cierpiących z powodu przewlekłego i okresowego bólu.

Kompres ThermaCare® uwalnia ciepło dzięki opatentowanym „komórkom” rozgrzewającym przynosi ulgę bezpośrednio w miejscu bólu poprawiając krążenie krwi, co prowadzi do rozluźnienia napiętych mięśni. Kompres jest przeznaczony do jednorazowego użytku.

Redukuje odczuwanie bólu:

- Ciepło stymuluje termoreceptory, co powoduje blokowanie przekazywania bodźców bólowych do mózgu

Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu krwi w bolącym miejscu, co oznacza:

- lepsze dotlenienie i odżywienie uszkodzonych tkanek
- pozbycie się toksyn wytworzonych przez obolałe mięśnie

Pomaga rozluźnić napięte tkanki miękkie, rozluźniając mięśnie, co wpływa na zwiększenie elastyczności i redukuje sztywność / napięcia.

Optymalnie dobrana temperatura stałego ciepła 40°C pozwala leczyć nawet w trakcie snu, dzięki czemu pacjent z bólem ma szansę na kontynuowanie kilkudniowej sesji leczniczej. (Ponieważ ryzyko oparzeń skóry rośnie wraz z wiekiem jeżeli pacjent ma 55 lat bądź więcej, zaleca się stosowanie kompresu na ubranie oraz niestosowanie kompresu podczas snu.).

Nowy kompres samorozgrzewający ThermaCare:

- Emituje optymalne lecznicze ciepło przez 12 godzin noszenia kompresu
- Wytwarza głęboko wnikające lecznicze ciepło
- Działa w miejscu bólu (plecy, szyja, ramiona, nadgarstek)
- Działa w sposób bezpieczny, gdyż nie zawiera żadnych substancji aktywnych.

Sposób użycia

Zrozerwać torebkę bezpośrednio przed użyciem. Kompres ThermaCare® osiąga temperaturę leczniczego stałego ciepła 40°C ciepła w ciągu 30 minut. Należy umieścić kompres w miejscu bólu ciemniejszymi dyskami do skóry.

Sposób użycia kompresów na szyję, barki i nadgarstek: należy zachować szczególną uwagę zakładając kompres na nadgarstek, gdyż opatentowane dyski rozgrzewające nie mogą na siebie nachodzić.

Dla uzyskania maksymalnej efektywności zaleca się stosować ThermaCare® do 12 godzin. Nie należy stosować dłużej niż 12 godzin w przeciągu 24 godzinnego okresu używania na to samo miejsce.

Ostrzeżenia

Produkt może wywołać oparzenia.

Podczas stosowania należy często kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia skóry należy natychmiast zdjąć kompres.

W przypadku odczuwania zbyt wysokiej temperatury – należy przerwać stosowanie lub nałożyć kompres na warstwę ubrania, a nie bezpośrednio na skórę.

Dla oceny indywidualnej tolerancji termicznej, zanim podejmie się decyzję o zastosowaniu podczas snu, należy zastosować kompres w ciągu dnia.

Nie przykładać dodatkowego ucisku czy opaski dociskającej kompres.

Produkty rozgrzewające mogą powodować poparzenia. Ryzyko wystąpienia poparzeń wzrasta wraz z wiekiem. Jeżeli pacjent ma 55 lat bądź więcej, zaleca się stosowanie kompresu na ubranie oraz niestosowanie kompresu podczas snu.

Przeciwwskazania

Nie stosować:

- jeżeli zawartość komórek rozgrzewających przecieka i/lub kompres jest uszkodzony lub zrozerwany
- z kremami przeciwbólowymi i/lub innymi maściami, ani z innymi środkami emitującymi ciepło
- na skórę chorą, popękaną lub uszkodzoną

- na obszarach wylewów podskórnych czy obrzęków
- na obszarach ciała z upośledzonym czuciem ciepła
- u osób nie będących w stanie w pełni dostosować się do instrukcji albo samodzielnie zdjąć kompres, w tym u dzieci, niemowląt i u niektórych osób w podeszłym wieku.

Przed zastosowaniem tego produktu należy się skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania:

- cukrzycy,
- problemów krążeniowych,
- choroby serca,
- reumatoidalnego zapalenia stawów
- ciąży.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.