

Trilac Lady Gyno, globulki dopochwowe, 10 sztuk

Nasza cena: 32,28 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	GLOB.DOPOCH.
Producent	AMARA ZAKŁ.FARMACEUTYCZNE POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Trilac Lady Gyno to wyrób medyczny w postaci globulek dopochwowych. Składniki produktu tworzą nawilżającą powłokę ochronną na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

Wskazania

U kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzy, w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy związanych z:

- atrofią błon śluzowych pochwy;
- niedoborem estrogenów;
- dyspareunią (bolesnością stosunków);
- długotrwałym stresem.

W celu wspomagania nawilżenia nabłonka pochwy:

- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych;
- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy;
- po porodzie;
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii;
- po zabiegach laserowych;
- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych;
- w okresie okołomenopauzalnym.

Wyrób zalecany jest także w celu zapobiegania niekorzystnym zmianom we florze i pH pochwy (podróże, basen, sauna, fitness, antybiotykoterapia) poprzez nawilżenie i utrzymanie naturalnego pH pochwy. Stosowanie wyrobu redukuje nieprzyjemny zapach z pochwy.

Produkt niehormonalny. Nie zawiera PEG, parabenów, detergentów w tym: SLS, SLES.

Działanie

Poprawia elastyczność pochwy, utrzymuje i przywraca jej fizjologiczne pH, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej oraz redukuje nieprzyjemny zapach.

Po aplikacji następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

Składniki

Sól sodowa kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.

Sposób użycia

Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.

Z blistry wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.

Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga! W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce do momentu stwardnienia globulki.

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.

Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.

Nie stosować w czasie menstruacji.

Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności. Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistry.

Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.

Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.

Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie) zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują samoistnie.

Zawartość

10 globulek dopochwowych

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny

AMARA

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

