

# Ucholek Spray Higiena, spray do uszu, 20ml

Nasza cena: 15,68 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	20ml
Postać	SPRAY D/USZU
Producent	PROLAB F.P.P.NAKŁO N/NOTECIA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## Ucholek Spray Higiena, spray do uszu, 20ml

### Spray do USZU dla osób dorosłych i dzieci

- usuwa woskowinę z uszu
- zapobiega zatykaniu uszu
- przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych
- umożliwia zachowanie właściwej higieny uszu w przypadku nadmiernej produkcji woskowiny

## Przeznaczenie i właściwości

Spray do uszu „UCHOLEK HIGIENA” jest skutecznym wyrobem medycznym przeznaczonym do rozpuszczenia i usuwania zgromadzonej woskowiny. Dzięki zawartej w produkcie naturalnej oliwie z oliwek rozpuszcza woskowinę i stopniowo usuwa ją z uszu na zewnątrz kanału słuchowego, wykorzystując do tego naturalny mechanizm oczyszczania ucha.

Spray do uszu „UCHOLEK HIGIENA” może być stosowany zapobiegawczo u osób szczególnie narażonych na gromadzenie się woskowiny:

- u dzieci
- u osób noszących aparaty słuchowe lub słuchawki
- u osób z tendencją do zalegania wody w przewodzie słuchowym w trakcie kąpieli lub uprawiania sportów wodnych
- u osób z tendencją do nawracających infekcji ucha zewnętrznego.

## Skład

Oliwa z oliwek, Olej z słodkich migdałów, Tokoferol

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Należy zapobiegać przypadkowemu dostaniu się do oczu.

## Sposób użycia

Stosować do ucha 1-2 dawki 3 razy dziennie, aż do rozpuszczenia woskowiny.

Wyrób medyczny aplikować bardzo ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia ucha spowodowanego niewłaściwym użyciem aplikatora.

Wyrób medyczny może być stosowany u dzieci oraz osób dorosłych.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Należy zapobiegać przypadkowemu dostaniu się do oczu.

## Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp.z o.o.

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10 Fax: (52) 386 73 23

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**