

# Viscoplast Prestovis Plus, Bardzo Mocny plaster do cięcia, biały, 1mx6cm



Nasza cena: 6,98 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	*1
Producent	VISCOPLAST 3M POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

### Opis

## Viscoplast Prestovis Plus, Bardzo Mocny plaster do cięcia, biały, 1mx6cm

Jest to wyrób medyczny, który umożliwia swobodne dostosowanie odpowiedniej długości opatrunku do wielkości rany. Materiałem nośnym plastra jest miękka, a zarazem wytrzymała i elastyczna tkanina, dobrze przylegająca do skóry, nawet na łokciach i kolanach.

Plaster jest niezwykle odporny na uszkodzenia mechaniczne - nie rozrywa się pod wpływem naprężenia. Materiał, z którego został wykonany, jest oddychający, co wspiera naturalne mechanizmy gojenia się skóry. Opatrunek nie przykleja się do rany, co ułatwia usuwanie, bez uszkodzania zagojonej już rany.

Plaster nie zawiera lateksu, dobrze chroni ranę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostaniem się do niej brudu. Uniwersalny plaster w kolorze białym przeznaczony jest dla całej rodziny i dobrze sprawdzi się zarówno w apteczce domowej, jak i wyjazdowej.

## Parametry plastra

- rozmiar: 6 cm x 1 m,
- kolor biały,
- oddychający,
- bez lateksu,
- chłonny opatrunek, który nie przykleja się do skóry.

## Zastosowanie Viscoplast Prestovis Plus

Plaster pozwala odpowiednio zabezpieczyć ranę przed brudem i uszkodzeniami.

## Sposób użycia

Ranę i skórę wokół niej należy oczyścić i osuszyć.

Plaster wyciąć z opakowania i uciąć potrzebną wielkość.

Plaster nakleić na skórę w taki sposób, żeby opatrunek był umieszczony bezpośrednio na ranie. Obwód plastra docisnąć do skóry.

Podczas zdejmowania plastra ciągnąć go za jeden z brzegów równoległe do skóry.

Wymiana plastra zależy od indywidualnych potrzeb.

## Informacje dodatkowe

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.

Chronić od światła i wilgoci.

Tylko do użytku zewnętrznego.

Nie używać ponownie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.**