

Wartix Do Usuwania Kurzajek Aerozol 38Ml +Plastry

Nasza cena: 49,30 zł



Opis słownikowy

Producent	GENEXO SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Wartix - środek do szybkiego usuwania kurzajek.

Dawkowanie - Wartix Do Usuwania Kurzajek Aerozol 38Ml +Plastry

-zwrócić kurzajkę ku górze, tak aby zmieściła się w komorze aplikatora. Następnie przyłożyć aplikator tak, by krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurzajki.

-zdjąć aplikator z kurzajki. W tym momencie może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.

-trzykrotnie przycisnąć dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający. Przytrzymać aplikator na kurzajce przez co najmniej 10 sekund.

-po zastosowaniu należy oczyścić aplikator gazikiem czyszczącym, znajdującym się w zestawie.

-jeżeli po zastosowaniu Wartix kurzajka jest uniesiona i/lub bardzo wrażliwa można zakleić ją plastrem ochronnym znajdującym się w zestawie.

Składniki - Wartix Do Usuwania Kurzajek Aerozol 38Ml +Plastry

Zestaw zawiera:

-dozownik z aplikatorem zawierający dimetyloeter (15 dawek).

-ulotkę informacyjną.

- plastry ochronne (8 szt.).
- gaziki oczyszczające (16 szt.).

Działania

Wartix do leczenia kurzajek wykorzystuje wymrażania. Preparat jest skuteczny, a dodatkowo wyjątkowo bezpieczny oraz łatwy w użyciu. Płyn zamrażający aplikowany jest bezpośrednio na kurzajkę, która ulega wymrożeniu aż po rdzeń. Proces wymrażania może spowodować zaczerwienienie lub pojawienie się pęcherzyków na skórze, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem. Zazwyczaj wystarcza pojedyncze zastosowania Wartix. Po 10-14 dniach od wymrożenia kurzajka odpada, pozostawiając zdrowy, zregenerowany naskórek.

Uwagi

- w trakcie lub bezpośrednio po wymrażaniu kurzajki może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.
- po zabiegu może powstać pęcherzyk - nie należy go przekłuwać!
- pęcherzyk zazwyczaj jest oznaką skutecznego leczenia.
- nie skubać i nie drapać zamrożonej kurzajki.
- po zabiegu kurzajka powinna pozostać czysta - należy unikać jej zainfekowania.
- można normalnie pływać, myć się i kąpać.
- zamrożoną kurzajkę można zakleić plastrem ochronnym zawartym w opakowaniu.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.