

Woda morska izotoniczna, 30 ml



Nasza cena: 9,48 zł

Opis słownikowy

Marka	Cephamed
Opakowanie	30 ml
Producent	Admira Sp z o.o.
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Woda morska izotoniczna, 30 ml

Codzienna higiena i oczyszczanie nosa

- Przeznaczona dla dorosłych, dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.
- Nawilża wysuszoną śluzówkę nosa.
- Działa łagodząco w podrażnieniach śluzówki nosa, w stanach infekcji i alergii.
- Pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego.

Produkt zawiera:

Woda morska, woda oczyszczona.

Zawartość opakowania:

30 ml (opakowanie zawiera ok. 300 dawek).

Zastosowanie:

Woda morską Cephamed 30 ml jest izotonicznym roztworem wody morskiej, nawilża suchą śluzówkę nosa, stosuje się ją pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego, łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii oraz do codziennej higieny i oczyszczenia nosa.

Wskazania:

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych, dzieci i niemowląt powyżej 1 miesiąca życia:

- do codziennej higieny nosa;
- do nawilżania wysuszonej śluzówki nosa;
- łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników wyrobu.

Nie stosować preparatu w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Sposób użycia:

Delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora. Po każdym stosowaniu oczyścić końcówkę wodą z mydłem, a następnie opłukać i osuszyć.

Niemowlęta powyżej 1. miesiąca życia i dzieci:

1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

Dorośli:

1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie.

Należy uważnie przeczytać instrukcje używania znajdującą się w opakowaniu, gdyż zawiera ona istotne informacje dla pacjenta o zastosowaniu „Cephamed woda morską izotoniczną 30 ml”, a następnie przechowywać ją, aby w razie konieczności móc powtórnie ją przeczytać.

Producent:

GLOBAL PHARMA CM S.A.
ul. Berezów 49A
26-130 Suchedniów

Dystrybutor:

Admira Sp. z o.o.
ul. Gdańska 91/93
90-613 Łódź

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.