

Zatoxin Rinse, zestaw uzupełniający do płukania nosa, 30 saszetek



Nasza cena: 18,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	SASZ.
Producent	TACTICA POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Zatoxin Rinse, zestaw uzupełniający do płukania nosa, 30 saszetek

Wskazania

- zapalenie zatok przynosowych
- nieżyt nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

Właściwości

Zatoxin Rinse pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję. Dodatkowo wyrób nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok.

Skład

chlórek sodu, dwuwęglan sodu

Sposób użycia

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, nieżyty nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok

rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała.

W przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała.

Płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza; profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Dokładny opis sposobu użycia znajduje się w instrukcji używania dołączonej do opakowania.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.